



RANNEKKEET PAHOINVOINNIN HOITOO

SEA-BAND®

Sabora
KOE HYVÄ VOINTI



SEA-BAND®

SEA-BAND-rannekkeet auttavat tutkitusti ja tehokkaasti raskaus- ja matkapahoinvointiin. Vaikutus perustuu ranteessa sijaitsevan P6-akupisteen painantaan. SEA-BAND-rannekkeet lievittävät pahoinvointia ilman lääkkeiden haittavaikutuksia.

Myös leikkauksen ja kemoterapian jälkeistä pahoinvointia voidaan hoitaa SEA-BAND-rannekkeilla.

SEA-BAND-rannekkeista löytyy omat koot ja värit aikuisille ja lapsille.



KÄYTTÖOHJEET

1. Aseta kolme sormea ranteen kämmenpuolelle siten, että nimettömän reuna on kämmenreunaa vasten. P6-akupiste on etusormen alla kahden keskijänteen välissä.
2. Aseta rannekkeen nappi alaspäin suunnattuna P6-akupisteen päälle. Aseta toinen ranneke toiseen käteen samalla tavalla. Vaikutus alkaa muutamassa minuutissa.



Sabora
KOE HYVÄ VOINTI

Sabora Pharma Oy • Puh. 029 3700 350 • info@sabora.fi • www.sabora.fi